

**O DIB 0,5 é um dispositivo intravaginal impregnado com progesterona, utilizado para a regulação do ciclo estral de fêmeas bovinas.**

**Fórmula:**

Cada dispositivo contém:

Progesterona ..... 0,5 g  
Silicone q.s.p. .... 29,0 g

**Apresentação:**

Bolsa contendo 10 dispositivos.

**Ação:**

A progesterona liberada a partir da colocação do dispositivo tem um papel importante na dinâmica folicular, os níveis supraluteais obtidos depois de alguns minutos da introdução do dispositivo provocam a regressão do folículo dominante e aceleram o início de uma nova onda folicular, a interrupção da secreção dos hormônios foliculares (estrógeno e inibina) é responsável pelo surgimento da nova onda de crescimento folicular. Por outro lado, a retirada do dispositivo e a consequente queda da progesterona a níveis subluteais (menos que 1 ng/mL) levam a um aumento da frequência dos pulsos de LH, ao crescimento e persistência do folículo dominante, com altos níveis de estradiol que provocam o cio, e finalmente o pico de LH e a ovulação.

**Indicações:**

Indução de ovulação e sincronização de cio em fêmeas bovinas.

**Efeitos indesejados:**

Ocasionalmente poderão se apresentar sinais de vaginite leve, os quais desaparecem de modo espontâneo e não comprometem a eficácia do tratamento, nem a saúde do animal.


Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

PARTIDA, FABRICAÇÃO E VENCIMENTO: ver gravação na bolsa.


**APLICADOR DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO (D.I.B.)**

**MODO DE USO:**


1. Segurar o aplicador pela extremidade livre e introduzir o dispositivo.

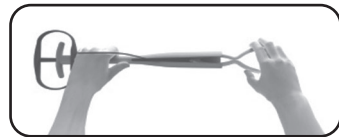

2. Certificar-se que o DIB esteja perfeitamente encaixado no aplicador, com a cauda plástica do produto livre.

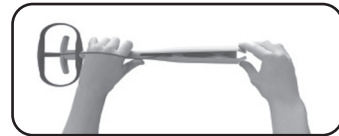

3. Introduzir o aplicador na vagina previamente higienizada, até atingir o fundo do canal vaginal. Pressionar o êmbolo do aplicador para expelir o dispositivo, retirando o aplicador em seguida.

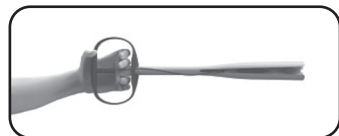

Recomenda-se realizar a desinfecção do aplicador antes do uso, e entre aplicações em diferentes animais.

**Contraindicações:**

Não utilizar em animais com anomalias vaginais.

**Precauções:**

Recomenda-se lavar e desinfetar o aplicador após cada uso.

**O uso ou aplicação deste produto em seres humanos causa graves riscos à saúde.**

**Venda sobre prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº SP 000072-8.000010 em 30/07/2018.

**Responsável Técnico:** Renato B. Ferreira - CRMV-SP nº 1.695

**Fabricante:** Syntex S.A.

Luis de Sarro 501 (B1838DQK) - Luis Guillón - Buenos Aires - Argentina

**Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:**

**Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.**

R. Luiz Fernando Rodriguez, 1701- CEP 13064-798 – Campinas – SP

CNPJ nº 43.588.045/0001-31

PRODUTO IMPORTADO

**zoetis**

SAC 0800 011 19 19



BD5/C18-Br