

# Guia do Usuário

---


*SEARCHPOINT™*

## Sumário

1.	Como criar um perfil de usuário no SearchPoint™?	3
2.	Como encontrar e usar as principais configurações do <i>SearchPoint</i> ™	4
2.1.	Configurações	4
2.2.	Seção de ajuda	5
3.	Acompanhamento de jobs e amostras	5
4.	Gerenciar rebanho	7
4.1.	Animais no registro	7
4.2.	Grupos de animais	8
4.2.1.	Criar novos grupos	8
4.2.2.	Edição de grupos	9
4.3.	Compartilhado	10
5.	Relatórios	11
5.1.	Tabelas	11
5.1.1.	Início	11
5.1.2.	Busca por ID de animal	12
5.1.3.	Filtros de animais	13
5.1.4.	Filtros de características/índices	13
5.1.5.	Mapa de calor	14
5.1.6.	Personalização de relatórios	14
5.2.	Relatórios individuais de animais	16
5.3.	Condições genéticas	16
5.4.	Parentesco	17
6.	Análise	17
6.1.	Referência	18
6.2.	Tendência genética	19
6.3.	Distribuição de características	19
6.4.	Comparação de características	20
6.5.	Resumo do pai	21
6.6.	Seleção de multi-características/índice	22


## 1. Como criar um perfil de usuário no SearchPoint™?

É necessário criar uma conta para que receba acesso aos resultados dos clientes com os quais você trabalha ou resultados de seus próprios animais. Acesse [mySearchPoint.com.br/public/start](https://mySearchPoint.com.br/public/start) e clique em “Registrar”.

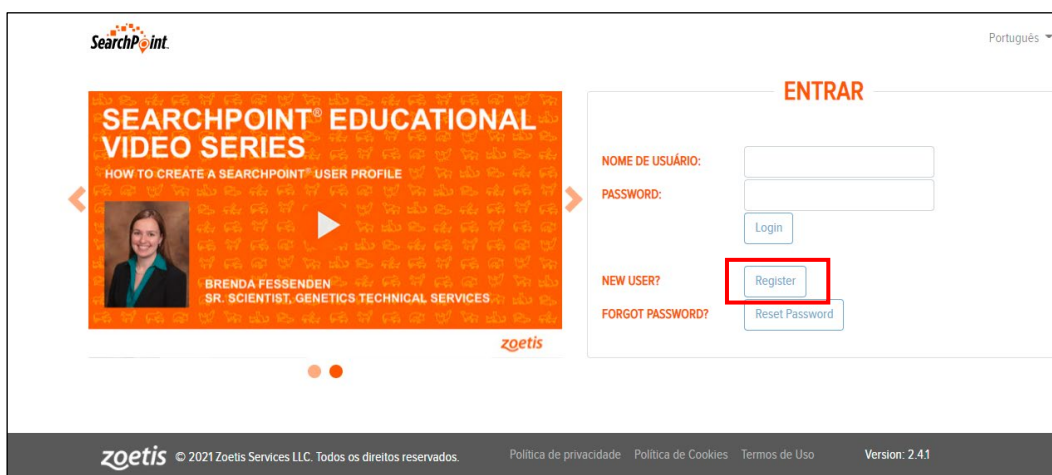

The screenshot shows the SearchPoint website interface. On the left, there is a video player titled "SEARCHPOINT® EDUCATIONAL VIDEO SERIES" with a play button and a video thumbnail of Brenda Fessenden. On the right, under the heading "ENTRAR", there are input fields for "NOME DE USUÁRIO:" and "PASSWORD:", a "Login" button, a "NEW USER?" section with a "Register" button (highlighted with a red box), and a "FORGOT PASSWORD?" section with a "Reset Password" button. The footer contains the Zoetis logo, copyright information, and links for privacy and terms of use.

Informe os campos necessários para efetuar a criação de sua conta, assinale o *check box* relacionado aos Termos de Uso e Política de Privacidade e clique em “Registro”.

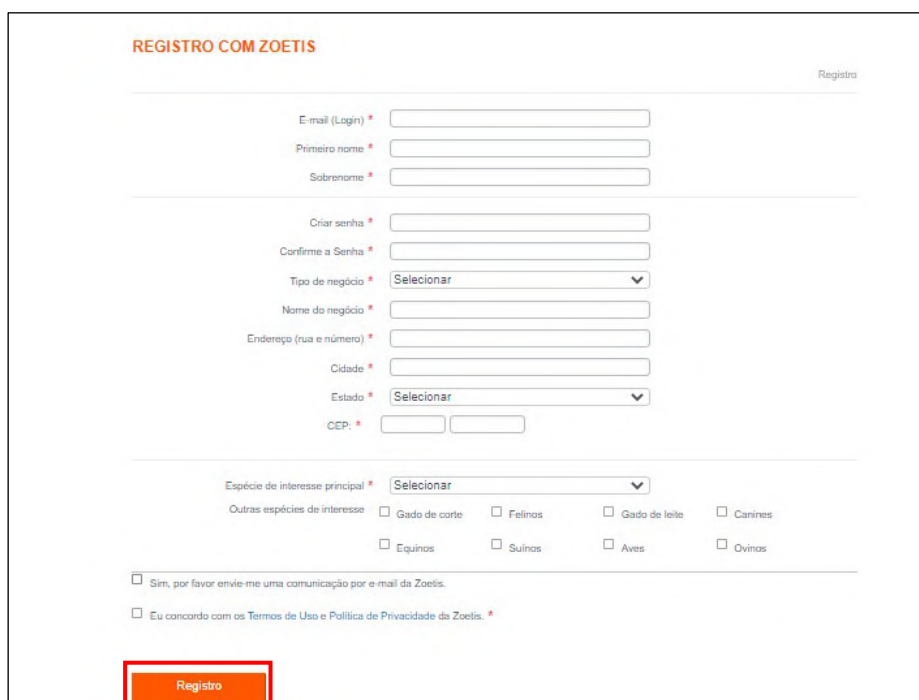


The screenshot shows the "REGISTRO COM ZOETIS" form. It includes fields for "E-mail (Login)", "Primeiro nome", "Sobrenome", "Criar senha", "Confirme a Senha", "Tipo de negócio" (dropdown), "Nome do negócio", "Endereço (rua e número)", "Cidade", "Estado" (dropdown), and "CEP". Below these are checkboxes for "Espécie de interesse principal" and "Outras espécies de interesse" (Gado de corte, Felinos, Gado de leite, Canídeos, Equinos, Suínos, Aves, Ovídeos). At the bottom, there are checkboxes for "Sim, por favor envie-me uma comunicação por e-mail da Zoetis." and "Eu concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade da Zoetis." (highlighted with a red box). A "Registro" button is at the bottom right.

Após, registrar, uma caixa de diálogo será aberta, clique em “Pular esta Página”.



Finalizado esse processo, sua conta já está criada. Agora, basta enviar um e-mail ao Consultor Técnico de sua região ou para o endereço [gustavo.goncalves@zoetis.com](mailto:gustavo.goncalves@zoetis.com), informando o nome do cliente e qual e-mail utilizou para a criação do cadastro. Ao logar novamente, já com o vínculo formatado, você terá acesso aos resultados compartilhados contigo.


**Importante:** Caso você esqueça sua senha, não se preocupe, basta solicitar que ela seja redefinida, clicando no botão **“Redefinir Senha”**. Você receberá um link via e-mail para que uma nova senha seja criada e, então, possa continuar navegando.

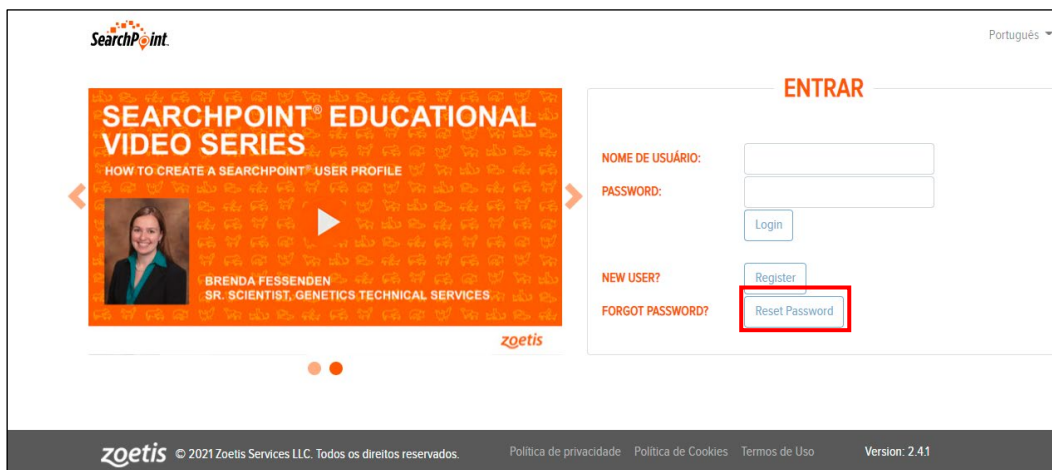

## 2. Como encontrar e usar as principais configurações do SearchPoint™

### 2.1. Configurações

Ao logar na plataforma ([mySearchPoint.com.br/public/start](http://mySearchPoint.com.br/public/start)), fazendo uso do seu login e senha, no canto superior direito da tela, você verá um botão de **“Configurações”**

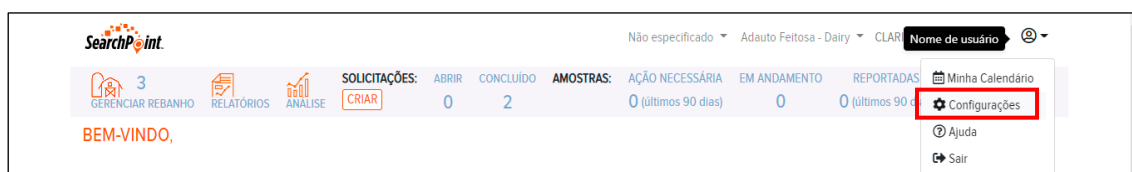

Nessa seção, é possível, além de atualizar informações do perfil, trocar e-mail e/ou senha.

Atualizar perfil

Mudar o e-mail

Mudar senha

Cancel

Além disso, pode-se escolher o idioma de sua preferência, o formato com que as datas são mostradas, a maneira como os decimais são separados e, o mais importante, as notificações.

SearchPoint

Não especificado ▾ Customer\_28 ▾ CLARIFIDE CDCB Holstein ⓘ

2845

GERENCIAR REBANHO

RELATÓRIOS

ANÁLISE

STRATEGY

SOLICITAÇÕES:

ABRIR

CONCLUÍDO

AMOSTRAS:

AÇÃO NECESSÁRIA

EM ANDAMENTO

REPORTADAS

0

0

0 (últimos 90 dias)

8

0 (últimos 90 dias)

CONFIGURAÇÕES

MINHAS CONFIGURAÇÕES

IDIOMAS

FORMATOS DE DATAS

FORMATAÇÃO NUMÉRICA

NOTIFICAÇÕES

CONFIGURAÇÕES

MINHAS CONFIGURAÇÕES

IDIOMAS

FORMATOS DE DATAS

FORMATAÇÃO NUMÉRICA

NOTIFICAÇÕES

Notificações para Customer\_28

Gerencie as notificações que você recebe

Mostrar Mais

Endereço de E-mail: genetics.br@zoetis.com

Número de telefone celular: Não estabelecido

Ir à página de configurações para atualizar

Envie-me as seguintes notificações...

Ação	E-mail	SMS
Novos resultados	Ligado <input checked="" type="checkbox"/>	Desligado <input type="checkbox"/>
Ação de Estado da Amostra Necessária	Ligado <input checked="" type="checkbox"/>	Desligado <input type="checkbox"/>
Evento de calendário	Desligado <input type="checkbox"/>	Desligado <input type="checkbox"/>

Salvar configurações de notificação

Escolha as notificações que deseja receber e por quais canais recebê-las. Por fim, clique em **“Salvar Configurações de Notificação”**.

## 2.2. Seção de ajuda

SearchPoint

Não especificado ▾ Adauto Feitosa - Dairy ▾ CLARIFIDE Nome de usuário ⓘ

3

GERENCIAR REBANHO

RELATÓRIOS

ANÁLISE

SOLICITAÇÕES:

ABRIR

CONCLUÍDO

AMOSTRAS:

AÇÃO NECESSÁRIA

EM ANDAMENTO

REPORTADAS

0

2

0 (últimos 90 dias)

0

0 (últimos 90 dias)

BEM-VINDO,

Minha Calendário

Configurações

Ajuda

Sair

AJUDA

FALE CONOSCO

DEFINIÇÕES DE TRATO

GLOSSÁRIO

DÚVIDAS FREQUENTES

VIDEO

Essa seção tem por objetivo fornecer auxílio sobre as principais informações contidas nos *SearchPoint™*. Na sequência, esse *menu*, mostra informações de contato, definições sobre as características, definições sobre os termos e funcionalidades presentes no *SearchPoint™* e as principais dúvidas de usuários e vídeos educacionais sobre a plataforma.

## 3. Acompanhamento de jobs e amostras

Quando chegam em São Paulo, as amostras passam por um tratamento térmico, a documentação é conferida e, então, um número de pedido é criado, esse pedido também é chamado de **“job”** e segue o padrão BR seguido por 6 dígitos, exemplo BR888777. De SP,

seguem para Kalamazoo, nos EUA. Lá são processadas e após, essa etapa, ganham visibilidade do *SearchPoint™*, ficando disponíveis para consulta no Menu “Solicitações”, item “Abrir”, no qual é possível ver a lista de pedidos abertos e no Menu “Amostras”, item “em andamento”, no qual podemos acessar a lista de amostras enviadas, aguardando resultados.

GERENCIAR REBANHO	574	RELATÓRIOS	ANÁLISE	SOLICITAÇÕES	ABRIR	CONCLUÍDO	AMOSTRAS	AÇÃO NECESSÁRIA	EM ANDAMENTO	REPORTADAS
				6	6			0 (últimos 90 dias)	2	36 (últimos 90 dias)
AMOSTRAS	TUDO	AÇÃO NECESSÁRIA	EM ANDAMENTO	REPORTADAS						

Item “Abrir” – Ao clicarmos no número de pedido, também consegue-se acessar a listagem das amostras enviadas. Na parte superior da tabela, existem uma série de filtros que podem refinar a busca por período.

Ocultar filtros				
Nº da Solicitação	Date Type	Período		
Tudo	Data da Solicitação	Iniciar	ano-mês-dia	Finalizar ano-mês-dia
Restaurar filtros				
ABRIR SOLICITAÇÕES PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS				
Número da Solic...	Data da Solicitaç...	Data de Recebi...	Produtos	
BR844244	2021-03-12	2021-03-22	Beta Casein A2,CLA...	
BR755037	2019-05-09	2019-05-30	Beta Casein A2,CLA...	
BR703618	2018-10-23	2018-11-02	Beta Casein A2,CLA...	
BR698527	2018-07-26	2018-08-07	CLARIFIDE CDCB,CL...	
BR632140	2017-05-18	2017-06-06	CLARIFIDE CDCB	
BR604346	2016-06-21	2016-06-29	CLARIFIDE CDCB	

Item “Em andamento” – Nessa seção, podemos acompanhar o status das amostras.

Ocultar filtros							
Nº da Solicitação	Date Type	Período					
Tudo	Data da Solicitação	Iniciar	ano-mês-dia	Finalizar	ano-mês-dia		
Restaurar filtros							
EM ANDAMENTO PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS							
Número da Solic...	ID do Animal	Bar Code	Data da Solicitaç...	Data de Recebi...	Produtos	Descrição de status de amostra	Ação Necessária
BR703618	654	US9001841938	2018-10-23	2018-11-02	Beta Casein A2	No Laboratório	
BR703618	680	US9001841947	2018-10-23	2018-11-02	Beta Casein A2	No Laboratório	

Já os Jobs finalizados, ou seja, com resultados disponíveis, estão visíveis no Menu “Solicitações”, item “Concluído”. A lista das amostras cujos resultados já estão disponíveis encontram-se no menu “Amostras, item “Reportadas”. Entretanto, apenas os resultados disponibilizados nos últimos 90 dias, aparecem nessa seção.

GERENCIAR REBANHO	574	RELATÓRIOS	ANÁLISE	SOLICITAÇÕES	ABRIR	CONCLUÍDO	AMOSTRAS	AÇÃO NECESSÁRIA	EM ANDAMENTO	REPORTADAS
				6	6			0 (últimos 90 dias)	2	36 (últimos 90 dias)
AMOSTRAS	TUDO	AÇÃO NECESSÁRIA	EM ANDAMENTO	REPORTADAS						

**Importante:** caso exista algum conflito que impeça o resultado de ser liberado, por exemplo, intervalos entre o nascimento de duas irmãs maternas inferior a 273 dias, aliado ao fato de nenhuma delas ser de TE/FIV, basta que consulte a seção “Ação Necessária”.

574	RELATÓRIOS	ANÁLISE	SOLICITAÇÕES: ABRIR CONCLUÍDO	AMOSTRAS: AÇÃO NECESSÁRIA	EM ANDAMENTO	REPORTADAS
GERENCIAR REBANHO	RELATÓRIOS	ANÁLISE	6 6	0 (últimos 90 dias)	2	36 (últimos 90 dias)
AMOSTRAS	TUDO	AÇÃO NECESSÁRIA	EM ANDAMENTO	REPORTADAS		

Para resolver os conflitos, entre em contato com o Consultor que o atende e relate a ocorrência. Ele solicitará informações adicionais e checagens a fim de que possamos liberar os resultados. Essas pendências só existem para os produtos *Clarifide® Dairy* e *Plus*. Nos demais produtos, essas checagens não são realizadas.

**Importante:** caso você possua mais que uma raça testada e não esteja conseguindo visualizar os resultados de uma determinada raça, verifique sempre no campo superior da tela, se a raça correta está selecionada.

SearchPoint	215	RELATÓRIOS	ANÁLISE	SOLICITAÇÕES: ABRIR CONCLUÍDO	AMOSTRAS: AÇÃO NECESSÁRIA	EM ANDAMENTO	REPORTADAS
GERENCIAR REBANHO	RELATÓRIOS	ANÁLISE	0 1	0 (últimos 90 dias)			
					CLARIFIDE Nelore	Nelore	
					CLARIFIDE Nelore		
					CLARIFIDE CDCB		

## 4. Gerenciar rebanho

Sabemos que o usuário gerencia animais, não amostras. Essa seção foi projetada com a finalidade de auxiliar a definição de como visualizar as informações de um jeito que faça sentido. Por meio dela, é possível definir grupos de animais, alterar status de animais que não mais estão no rebanho e determinar como compartilhar informações com outros usuários.

SearchPoint	200	RELATÓRIOS	ANÁLISE	SOLICITAÇÕES: ABRIR CONCLUÍDO	AMOSTRAS: AÇÃO NECESSÁRIA	EM ANDAMENTO	REPORTADAS
GERENCIAR REBANHO	RELATÓRIOS	ANÁLISE	0 0	0 (últimos 90 dias)			
GERENCIAR REBANHO	ANIMAIS NO REGISTRO	GRUPOS DE ANIMAIS	GRUPOS DE CLIENTES	COMPARTILHADO			

Para acessá-la, basta clicar em **“Gerenciar Rebanho”**.

### 4.1. Animais no registro

Por meio dessa seção, é possível alterar rapidamente o status dos animais que deixaram a fazenda; para isso, basta selecionar a caixa de verificação à esquerda dos IDs dos animais dos quais deseja-se alterar o status e selecionar os status na lista suspensa que se encontra abaixo. Depois, basta clicar em **“Atualizar estados”**.

NUMBER OF SELECTED ANIMALS: 2

TODOS OS ANIMAIS PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

ID do Animal	Grupos	Estado	Sexo	Data de Nascimento	Ação
<input type="checkbox"/> 17576	Active Breeding List 2020-10-13,Breedin...	Ativo	Fêmea	2017-11-06	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input checked="" type="checkbox"/> 17576	Active Breeding List 2020-10-13,Clarife...	Ativo	Fêmea	2017-11-05	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input checked="" type="checkbox"/> 17575	Active Breeding List 2020-10-13,Breedin...	Ativo	Fêmea	2017-11-05	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input type="checkbox"/> 17574	Active Breeding List 2020-10-13,Clarife...	Ativo	Fêmea	2017-11-04	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input type="checkbox"/> 17568	Active Breeding List 2020-10-13,Clarife...	Ativo	Fêmea	2017-11-03	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input type="checkbox"/> 17569	Active Breeding List 2020-10-13,Clarife...	Ativo	Fêmea	2017-11-03	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input type="checkbox"/> 17571	Active Breeding List 2020-10-13,Clarife...	Ativo	Fêmea	2017-11-03	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input type="checkbox"/> 17564	Active Breeding List 2020-10-13,Clarife...	Ativo	Fêmea	2017-11-02	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input type="checkbox"/> 17563	Active Breeding List 2020-10-13,Clarife...	Ativo	Fêmea	2017-11-02	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
<input type="checkbox"/> 17562	Active Breeding List 2020-10-13,Clarife...	Ativo	Fêmea	2017-11-02	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...

Ativo  
Inativo - Abatido  
Inativo - Vendido  
Inativo - Morreu  
Inativo - Outros

ATUALIZAR ESTADOS

## 4.2. Grupos de animais

Essa seção permite criar, modificar ou deletar grupos específicos dentro da fazenda. Um mesmo animal pode fazer parte de diversos grupos.

### 4.2.1. Criar novos grupos

Um grupo de animais tem a finalidade única de permitir um melhor gerenciamento dos animais

GERENCIAR REBANHO ANIMAIS NO REGISTRO GRUPOS DE ANIMAIS GRUPOS DE CLIENTES COMPARTILHADO

Criar, modificar ou deletar grupos específicos de sua operação

Mostrar Mais

CRUIR NOVO GRUPO RELATÓRIO DE DOWNLOAD

GERENCIAR REBANHO ANIMAIS NO REGISTRO GRUPOS DE ANIMAIS GRUPOS DE CLIENTES COMPARTILHADO

**Criar grupo animal**

Criar grupos que lhe ajudarão a melhor gerenciar seus animais

Mostrar Mais

Nome do Grupo

Buscar por ID de Animal

Filtro Escolher predefinição SALVAR COMO PREDEFINIÇÃO LIMPAR FILTROS

Grupo Sexo Estado

Período de Nascimento

Iniciar ano-mês-dia Finalizar ano-mês-dia

ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE

Para efetivarmos a criação do grupo, escolhemos um nome e, a fim de facilitar, podemos fazer uso dos diversos filtros disponíveis: sexo, estado, faixa de nascimento e, um bastante importante, o filtro de característica/índice.



Mérito Volume  %   %

Valor de variação mais baixa: -72    Valor médio dentro da variação: 127    Valor de variação mais alta: 630    Animais na variação: 2058

ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE ⓘ

NUMBER OF SELECTED ANIMALS: 4

GRUPO ANIMAL    PERSONALIZAR COLUMNS EXIBIDAS

<input type="checkbox"/>	ID do Animal	ID Oficial	Nome do Animais	Grupos	Estado	Sexo	Data de Nascimento
<input checked="" type="checkbox"/>	17660	HOCHLSAG007717660		Active Breeding List 2020-10-13,Clarifoe...	Ativo	Fêmea	2017-11-27
<input checked="" type="checkbox"/>	17659	HOCHLSAG007717659		Active Breeding List 2020-10-13,Breedin...	Ativo	Fêmea	2017-11-26
<input checked="" type="checkbox"/>	17653	HOCHLSAG007717653		Active Breeding List 2020-10-13,Clarifoe...	Ativo	Fêmea	2017-11-21
<input checked="" type="checkbox"/>	17651	HOCHLSAG007717651		Active Breeding List 2020-10-13,Breedin...	Ativo	Fêmea	2017-11-20
<input type="checkbox"/>	17584	HOCHLSAG007717584		Active Breeding List 2020-10-13,Clarifoe...	Ativo	Fêmea	2017-11-06
<input type="checkbox"/>	17581	HOCHLSAG007717581		Active Breeding List 2020-10-13,Clarifoe...	Ativo	Fêmea	2017-11-07
<input type="checkbox"/>	17580	HOCHLSAG007717580		Active Breeding List 2020-10-13,Breedin...	Ativo	Fêmea	2017-11-06
<input type="checkbox"/>	17575	HOCHLSAG007717575		Active Breeding List 2020-10-13,Breedin...	Ativo	Fêmea	2017-11-05
<input type="checkbox"/>	17574	HOCHLSAG007717574		Active Breeding List 2020-10-13,Clarifoe...	Ativo	Fêmea	2017-11-04
<input type="checkbox"/>	17568	HOCHLSAG007717568		Active Breeding List 2020-10-13,Clarifoe...	Ativo	Fêmea	2017-11-03
<input type="checkbox"/>	17569	HOCHLSAG007717569		Active Breeding List 2020-10-13,Clarifoe...	Ativo	Fêmea	2017-11-03

1 - 100 of 2058 items    Page 1 of 21    100 items per page

**SALVAR**    CANCELAR

Por meio dessa funcionalidade e com a ajuda dos botões deslizantes, podemos escolher os melhores, piores ou animais medianos para um ou várias características/índices. A próxima etapa é selecionar os animais fazendo uso da caixa de verificação e, então **“salvar”**. Caso os filtros tenham sido suficientes para definir todos os animais que pertencerão a um mesmo grupo, basta clicar na caixa de verificação, no topo da tabela, que todos os indivíduos serão selecionados e seguir com o botão **“salvar”**. Valores estatísticos que caracterizam o grupo em formação, são mostrados ao lado, tal qual ajustamos os botões deslizantes.

Mérito Volume  %   %

Valor de variação mais baixa: -72    Valor médio dentro da variação: 127    Valor de variação mais alta: 630    Animais na variação: 2058

ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE ⓘ

NUMBER OF SELECTED ANIMALS: 100

GRUPO ANIMAL    PERSONALIZAR COLUMNS EXIBIDAS

<input type="checkbox"/>	ID do Animal	ID Oficial	Nome do Animais	Grupos	Estado	Sexo	Data de Nascimento
<input checked="" type="checkbox"/>	17532	HOCHLSAG007717532		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-24
<input checked="" type="checkbox"/>	17527	HOCHLSAG007717527		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-22
<input checked="" type="checkbox"/>	17529	HOCHLSAG007717529		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-22
<input checked="" type="checkbox"/>	17638	HOCHLSAG007717638		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-21
<input checked="" type="checkbox"/>	17525	HOCHLSAG007717525		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-21
<input checked="" type="checkbox"/>	17521	HOCHLSAG007717521		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-20
<input checked="" type="checkbox"/>	17517	HOCHLSAG007717517		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-17
<input checked="" type="checkbox"/>	17515	HOCHLSAG007717515		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-16
<input checked="" type="checkbox"/>	17516	HOCHLSAG007717516		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-16
<input checked="" type="checkbox"/>	17512	HOCHLSAG007717512		"Active Breeding List with today's date", 2...	Inativo - Vendido	Fêmea	2017-10-15

1 - 100 of 2058 items    Page 1 of 21    100 items per page

**SALVAR**    CANCELAR

#### 4.2.2. Edição de grupos

Para editar grupos já formados, basta selecioná-los na tabela que mostra a lista com todos aqueles já criados.

GERENCIAR REBANHO						
ANIMAIS NO REGISTRO						
GRUPOS DE ANIMAIS						
GRUPOS DE CLIENTES						
COMPARTILHADO						
Criar, modificar ou deletar grupos específicos de sua operação						
Mostrar Mais						
CRIAR NOVO GRUPO						
RELATÓRIO DE DOWNLOAD						
GRUPOS DE ANIMAIS						
PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS						
Nome do Grupo	Número De Animais	Data de Criação	Data Modificada	Número de Machos	Número de Fêmeas	Ação
"Lista de Reprodução Ativa com a data de hoje"	179	2021-10-12	2021-10-12	0	179	Exibir   Editar   Deletar
"Active Breeding List with today's date"	100	2020-10-14	2020-10-14	0	100	Exibir   Editar   Deletar
25% Bottom - NM - Beef Semen	70	2021-10-10	2021-10-10	0	70	Exibir   Editar   Deletar
25% TOP - NM - Sexed Semen	70	2021-10-10	2021-10-10	0	70	Exibir   Editar   Deletar
25-75 - NM - Conventional Semen	139	2021-10-10	2021-10-10	0	139	Exibir   Editar   Deletar
ABL WTD	100	2021-04-07	2021-04-07	0	100	Exibir   Editar   Deletar
Active Breeding List - 04/13/2021	100	2021-04-12	2021-04-12	0	100	Exibir   Editar   Deletar
Active Breeding List - 13/04/21	100	2021-04-12	2021-04-12	0	100	Exibir   Editar   Deletar
Active Breeding List (JF)	279	2021-04-12	2021-04-12	0	279	Exibir   Editar   Deletar
Active Breeding List 04-12-21	100	2021-04-11	2021-04-11	0	100	Exibir   Editar   Deletar

Selecionado o grupo, basta clicar em **"Editar"** e fazer uso das mesmas ferramentas disponíveis para a criação de um novo grupo. Ao final, basta salvar as alterações;

Período de Nascimento

Iniciar

ano-mês-dia

Finalizar

ano-mês-dia

ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE

TODOS OS ANIMAIS

DIGITE O NOME DO RELATÓRIO AQUI

DIGITE O NOME DO RELATÓRIO AQUI

INGRESE EL NOMBRE DEL INFORME AQUI

PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

ID do Animal	Nome do Animais	Grupo	Sexo	Estado	Data de N...	Ação
Minima						
Média						
Máxima						
17437	"Lista de Reprodução ...	Fêmea	Ativo		2017-09-24	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
17438	"Lista de Reprodução ...	Fêmea	Ativo		2017-09-24	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
17440	"Lista de Reprodução ...	Fêmea	Ativo		2017-09-24	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
17436	"Lista de Reprodução ...	Fêmea	Ativo		2017-09-24	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
17441	"Lista de Reprodução ...	Fêmea	Ativo		2017-09-24	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
17439	"Lista de Reprodução ...	Fêmea	Ativo		2017-09-24	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
17442	"Lista de Reprodução ...	Fêmea	Ativo		2017-09-24	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...
17429	"Lista de Reprodução ...	Fêmea	Ativo		2017-09-23	Visualizar Animal   Visualizar Valor de R...

1 - 100 of 179 items

10

Page 1 of 2

100

Items per page

EDITAR

### 4.3. Compartilhado

A função **"Compartilhado"** permite um gerenciamento de como os dados são compartilhados com outros usuários, incluindo consultores ou parceiros de negócios.

2845

GERENCIAR REBANHO

RELATÓRIOS

ANÁLISE

STRATEGY

SOLICITAÇÕES:

ABRIR

CONCLUÍDO

AMOSTRAS:

AÇÃO NECESSÁRIA

EM ANDAMENTO

REPORTADAS

0

0

0 (últimos 90 dias)

8

0 (últimos 90 dias)

GERENCIAR REBANHO

ANIMAIS NO REGISTRO

GRUPOS DE ANIMAIS

GRUPOS DE CLIENTES

COMPARTILHADO

A função Compartilhado deixa que você gerencie como compartilhar dados com outras pessoas incluindo consultores ou parceiros de negócios

Mostrar Mais

COMPARTILHAR CONTA

REVOGAR COMPARTILHAMENTO SELECIONADO

RELATÓRIO DE DOWNLOAD

O próximo passo é marcar o nível de compartilhamento que deseja.

Compartilhar Conta

Compartilhe sua conta com outras pessoas para dar acesso a seus dados de animais, pedidos e amostras. Os destinatários receberão uma notificação quando você compartilhar sua conta.

Mostrar Mais

Compartilhar as Contas a Seguir:

Nome de Conta

Toda Informação

Compartilhar Informações do Animal?


Compartilhar Informações de Solicitação & Amostra?

☒ Sim

☒ Sim

☒ Sim

Por fim, insira o endereço a ser compartilhado, aceite os termos e condições e clique em **“Compartilhar conta”**.

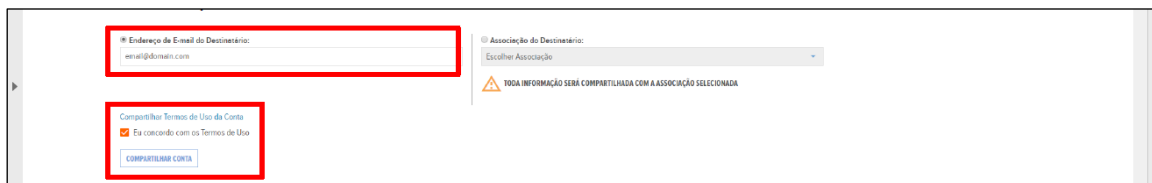


Caso esse usuário não tenha uma conta na plataforma, receberá um e-mail com orientações de como configurar uma. Na abertura dessa conta, ele obrigatoriamente deve usar o mesmo endereço de e-mail informado pelo autor do compartilhamento.

Caso ele já possua uma conta com o mesmo endereço que você informou, no próximo login ele já poderá visualizar os resultados, clicando no nome da conta na parte superior da página inicial.

## 5. Relatórios

Essa seção permite a visualização e criação de relatórios customizados com os resultados dos animais testados. Para acessá-la, basta clicar em **“Relatórios”**.

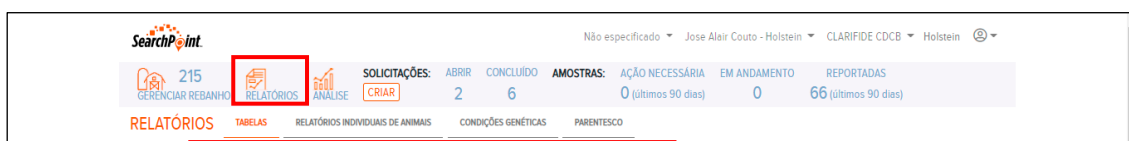

### 5.1. Tabelas

É uma seção que permite a criação de relatórios personalizados para seu gerenciamento. Na parte central da tela, uma tabela é exibida com um resumo de todos os resultados disponíveis até o momento.

#### 5.1.1. Início

Fazendo uso do menu suspenso **“Selecionar um Relatório ou Resumo”**, é possível selecionar o relatório que você deseja visualizar, as opções são as seguintes:

- Características fundamentais: mostra as principais características e índices, já aparecendo previamente selecionada entre as opções;
- Mérito Líquido: mostra todos os índices (TPI, Mérito Líquido, Mérito Queijo, Mérito Volume, Mérito Genético a Pasto e índices customizados criados na seção que veremos mais adiante);
- Confiabilidade: mostra a confiabilidade associada a cada predição de característica e índice dos animais testados;

- Relatório de Acasalamento: mostra o mesmo teor de informações mostradas quando a opção “características fundamentais” é selecionada, acrescentando-se as condições genéticas disponíveis na avaliação e informações de parentesco.

**Importante:** As quatro opções citadas acima referem-se a pedidos de *Clarifide® Dairy* e *Plus*. No caso do *Clarifide® Girolando*, as opções são: características fundamentais e confiabilidades. Já nos pedidos de raças do segmento corte, Nelore e Angus, as opções são: características e índices e Percentual no Ranking, o qual mostra um posicionamento do animal em relação aos animais testados daquela raça em específico.

### 5.1.2. Busca por ID de animal

O campo de busca tem a finalidade de encontrar determinado animal ou mesmo um grupo de animais, vários IDs podem ser colocados na caixa de busca de forma simultânea, conforme mostrado abaixo. Os resultados ficam disponíveis na tabela localizada na parte central da tela, nesse momento, podemos ver os resultados de forma individual, clicando sobre o ID do animal, na primeira coluna da tabela, ou imprimindo a tabela no formato desejado.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS								
ID do Animal	ID Oficial	Nome do Animais	Grupo	Sexo	Estado	Data de N...	Raça	DWPS
Best								760
Mean								361
Worst								-133
182	HOUSA000057587391	Saragoza 182	PO - PURAS DE ORIG...	Fêmea	Inativo - Morreu	2019-05-25	Holstein	
162	HOUSA000057549153		PO - PURAS DE ORIG...	Fêmea	Ativo	2017-12-04	Holstein	

### 5.1.3. Filtros de animais

A área de filtros permite selecionar animais com base em grupos, sexo, status, período de nascimento e número do pedido. Além disso, por meio do menu suspenso **“Escolher predefinição”**, é possível salvar critérios de filtros e utilizá-los no futuro. Sempre que um novo grupo de animais for testado, você pode visualizá-los utilizando critérios já costumadamente aplicados. Para criar, basta aplicar os filtros de seu interesse e, em seguida, clicar sobre **“Salvar como Predefinição”**. Um nome para essa predefinição será solicitado e basta clicar em **“Salvar”** para que esteja finalizado.

The screenshot shows the filter interface with the following elements:

- Filtro** dropdown menu with "Escolher predefinição" selected.
- SALVAR COMO PREDEFINIÇÃO** button highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.
- LIMPAR FILTROS** button.
- Grupo** dropdown menu with "Tudo" selected.
- Sexo** dropdown menu with "Fêmea" selected.
- Estado** dropdown menu with "Tudo" selected.
- Período de Nascimento** section with "Iniciar" and "Finalizar" date pickers.
- Nº da Solicitação** dropdown menu with "Tudo" selected.
- ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE** button.

The screenshot shows the filter interface with the following elements:

- Filtro** dropdown menu with "Escolher predefinição" selected.
- Enter Preset Name** text input field highlighted with a red box.
- SALVAR** button highlighted with a red box.
- CANCELAR** button.
- LIMPAR FILTROS** button.
- Grupo** dropdown menu with "Tudo" selected.
- Sexo** dropdown menu with "Fêmea" selected.
- Estado** dropdown menu with "Tudo" selected.
- Período de Nascimento** section with "Iniciar" and "Finalizar" date pickers.
- Nº da Solicitação** dropdown menu with "Tudo" selected.
- ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE** button.

### 5.1.4. Filtros de características/índices

Essa função permite a criação de grupos com quantidades precisas de animais e de acordo com uma estratégia pré-determinada, tendo como base o nível de superioridade genética de características ou índices de seu interesse. Depois de clicar em **“Adicionar Filtro de Característica/ Índice”** e marcar os filtros nos menus suspensos acima, basta fazer uso dos botões deslizantes para seguir a estratégia. No exemplo abaixo, foram desprezadas as 30 % fêmeas com pior predição para o índice DWP\$. Para escolher o tamanho do intervalo, pode-se arrastar os botões azuis ou mesmo digitar na caixa existente em cada extremidade. O nível de superioridade genética desse grupo filtrado e a quantidade de animais é apresentado ao lado direito da tela.

The screenshot shows the filter interface with the following elements:

- Grupo** dropdown menu with "Tudo" selected.
- Sexo** dropdown menu with "Fêmea" selected.
- Estado** dropdown menu with "Tudo" selected.
- Período de Nascimento** section with "Iniciar" and "Finalizar" date pickers.
- Nº da Solicitação** dropdown menu with "Tudo" selected.
- ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE** button.
- DWP\$** dropdown menu highlighted with a red box.
- 30 %** value highlighted with a red box.
- Slider controls** highlighted with a red box.
- 100 %** value highlighted with a red box.
- Valor de variação mais baixa** highlighted with a red box.
- Valor médio dentro da variação** highlighted with a red box.
- Valor de variação mais alta** highlighted with a red box.
- Animais na variação** highlighted with a red box.

Valor de variação mais baixa	Valor médio dentro da variação	Valor de variação mais alta	Animais na variação
296	452	760	40

**Importante:** Mais que um filtro por característica/índice pode ser adicionado, isso permite a formação de um grupo de animais que respeitem exigências mínimas. No exemplo abaixo, ficamos com as 70% melhores fêmeas em DWP\$ que estão entre as 20% melhores em TPI, totalizando 20 animais.

Grupo: Tudo Sexo: Fêmea Estado: Tudo

Período de Nascimento: Iniciar: ano-mês-dia Finalizar: ano-mês-dia N° da Solicitação: Tudo

DWP\$ 30% 100% Valor de variação mais baixa: 394 Valor médio dentro da variação: 522 Valor de variação mais alta: 760 Animais na variação: 20

TPI 80% 100% Valor de variação mais baixa: 2.319 Valor médio dentro da variação: 2.383 Valor de variação mais alta: 2.532 Animais na variação: 42

ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE

### 5.1.5. Mapa de calor

Quando ativado, o mapa de calor mostrará como os animais se classificam dentro do subconjunto filtrado de animais que você selecionou. Cada uma das cores tem um significado, basta consultar a legenda. Essa função só está disponível para características e índices oficiais, não funcionando para índices customizados.

Mapa de calor ☒

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DIGITE O NOME DO RELATÓRIO AQUI DIGITE O NOME DO RELATÓRIO AQUI PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

ID do Animal	Raça	DWP\$	TPI	Méri...	M... ↓	Méri...	Méri...	Prod...	Qua...	Qua...	FS	RFI	FE	Célu...	Ta
Best		760	2.532	701	712	661	710	1.395	74	50	539	176	162	3.27	
Mean		361	2.108	211	214	198	196	192	10	8	32	-3	34	2.92	
Worst		-133	1.531	-410	-417	-368	-419	-1.177	-44	-36	-325	-312	-109	2.59	
279	Holstein	760	2.532	701	712	661	710	1.395	74	50	539	176	162	3.27	
199	Holstein		2.410	617	630	545	569	537	44	30	165	-131	139	2.77	
256	Holstein	643	2.473	582	582	502	552	669	47	20	81	51	117	2.87	
197	Holstein		2.435	577	578	591	527	1.013	47	26	31	-48	122	2.81	
283	Holstein	728	2.363	546	565	409	556	-214	48	22	175	70	132	2.86	
242	Holstein	588	2.396	558	564	537	561	28	24	4	218	-47	68	2.8	
218	Holstein		2.335	553	561	500	464	882	58	37	1	-12	155	2.88	
211	Holstein		2.489	549	559	505	553	560	29	24	29	-7	90	2.7	
189	Holstein		2.415	541	545	502	496	945	53	37	111	33	159	3.05	
252	Holstein	561	2.327	522	532	472	476	-164	74	4	167	59	140	2.74	
260	Holstein	569	2.377	523	530	495	485	565	47	21	240	-16	136	2.73	

1-100 of 213 items Page 1 of 3 100 items per page

LEGENDA DO MAPA DE CALOR

NUMERIC	≤10%	10-25%	25-75%	75-90%	≥90%	Unranked on Heatmap
CHARACTER	Favorable	Neutral/Carrier	Unfavorable	Unranked on Heatmap		

\* Se vários animais tiverem o mesmo valor, serão diferenciados pelo lugares decimais que podem não ser visíveis.

### 5.1.6. Personalização de relatórios

Essa seção permite a customização de relatórios, os quais poderão auxiliar em ações gerenciais. Para iniciar, no topo da tabela com os resultados dos animais filtrados, procure por “Personalizar Colunas Exibidas”.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS									
DIGITE O NOME DO RELATÓRIO AQUI			PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS						
ID do Animal	Nome do Animais	Grupo	Sexo	Estado	Data de N...	Raça	DWPS	TPI	Méti...
Best							760	2,532	701
Mean							361	2,108	211
Worst							-133	1,531	-410
592	53	CRUZADAS-7/8-15/1...	Fêmea	Ativo	2017-03-17	Holstein			
Madri	79	PO - PURAS DE ORIG...	Fêmea	Inativo - Morreu	2013-01-16	Holstein			
Quântica	39	PO - PURAS DE ORIG...	Fêmea	Ativo	2017-04-10	Holstein			
Queila	31	PO - PURAS DE ORIG...	Fêmea	Ativo	2017-04-29	Holstein			
Quésia	90	PO - PURAS DE ORIG...	Fêmea	Ativo	2017-04-11	Holstein			
Surpresa	32	GC-4-5-6-4*5*6*GE...	Fêmea	Inativo - Morreu	2010-08-12	Holstein			
150	70	PO - PURAS DE ORIG...	Fêmea	Ativo	2017-04-10	Holstein			

Clique em **“Adicionar uma Aba”** e, então, nomeie e customize seu relatório. As colunas já presentes no relatório são aquelas dispostas na tela, você pode remover uma a uma clicando no **“x”** vermelho localizado à direita ou remover todas de uma única vez, clicando em **“Remover Todas”**. As pequenas setas direcionais, para cima e para baixo, servem para mover a ordem das colunas, novas colunas podem ser adicionadas fazendo uso do menu suspenso **“Selecione a coluna para seu relatório personalizado na caixa suspensa”**.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS
PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

ADICIONAR UMA ABA

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS
NOME
PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

Nome

Digite o nome do relatório aqui

Selecione a coluna para seu relatório personalizado na caixa suspensa

Specify column order or remove column

ID do Animal

1 ID Oficial

2 Nome do Animais

3 Grupo

4 Sexo

5 Estado

Terminadas as edições, clique na **ponta de seta**, localizada à direita do nome de seu relatório.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS
NOME
PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

Nome

Digite o nome do relatório aqui

Selecione a coluna para seu relatório personalizado na caixa suspensa

A tabela de resultados também possui funcionalidades que permitem auxiliar na visualização dos resultados. Ao passar o mouse sobre o título de cada coluna, uma breve explicação é mostrada na tela. Ao clicar sobre esse mesmo título, a tabela passa a ser ordenada do menor para o maior valor de acordo com a característica ou índice que é mostrada nessa coluna, um segundo clique irá ordenar a tabela em ordem inversa, ou seja, do maior para o menor. Além disso é possível alterar a ordem das colunas arrastando cada uma delas até a posição desejada.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS		NOME		PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS													
ID do Animal	TPI	Méri...	Méri...	Méri...	Méri...	P... ↑	Qua...	Qua...	FS	RFI	FE	Célu...	Taxa...	Taxa...	Taxa...	FI	
Best	1,654	-306	-312	-274	-274	-496	-47	-23	-220	26	-100	3.11	-4.1	-2.6	-5.6	-4.3	
Mean	1,535	-413	-419	-387	-387	-496	-47	-23	-220	26	-100	3.11	-4.1	-2.6	-5.6	-4.3	
Worst	1,396	-518	-527	-482	-482	-496	-593	-47	-23	-220	26	-100	3.11	-4.1	-2.6	-5.6	-4.3
SID2018	1,555	-414	-418	-404	-482	-593	-6	-19	-164	233	-61	3.14	-4.1	-2.6	-5.6	-4.3	
122	1,654	-306	-312	-274	-321	-565	-17	-23	-220	54	-91	3.11	0.3	-0.9	-0.4	-0.4	
ROY2011	1,396	-518	-527	-482	-496	-176	-47	-11	-73	26	-100	3.29	-0.9	-1.8	-0.6	-1.3	

## 5.2. Relatórios individuais de animais

Essa seção fornece um relatório no formato de uma página para determinado animal. Basta inserir o ID de um ou de vários animais no campo **“Busca por ID de animal”** para poder ver todas as informações desse animal em uma única tela de fácil visualização. O relatório pode ser impresso a todo momento, fazendo uso no menu suspenso **“Relatório de Download”**.

RELATÓRIOS

TABELAS

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS DE ANIMAIS

CONDIÇÕES GENÉTICAS

PARENTESCO

Esta opção fornece um relatório no formato de uma página para o determinado animal. Isso pode ajudá-lo a comercializar e gerenciar seus animais.

**Veja a informações do animal:** Insira um número de identificação de animal na caixa "Procurar por ID" abaixo e clique no ícone Pesquisar para poder ver todas as informações desse animal em uma única tela e de fácil visualização.

[Acabar](#)

Buscar por ID de Animal

122

RELATÓRIO DE DOWNLOAD

INFORMAÇÕES DO ANIMAL:

Referência

Animal ID: 122

Official ID: HOUSA000057475595

Sex: Fêmea

Birth Date: 2015-01-06

Breed: Holstein

Tipo de Resultado: Final

Avaliação de cruzados/puros: Purebred

PARENTESCO:

Evaluation Sire: HOUSA000065249839

NAAB Code (for Reported Sire): 094H014105

Pedigree MGS: HOCAN000005429693

Pedigree MGS NAAB: 039H000453

Evaluation Dam: HOUSA000057472180

TRATOS:

TPI: 1,654

CONDIÇÕES GENÉTICAS:

HH1: F\*\*

HH2: C\*\*

HH3: F\*\*

HH4: F\*\*

HH5: C\*\*

HH6: F\*\*

BLAD: F\*

Condrodisplasia: NP\*

## 5.3. Condições genéticas

Mostra os animais portadores de condições genéticas e haplótipos disponíveis. Para obter descrições sobre o que se refere cada um dos campos, deslize o ponteiro do *mouse* sobre cada um dos títulos da coluna. Nessa situação, o mapa de calor é um grande aliado para mostrar resultados favoráveis e desfavoráveis.

RELATÓRIOS

TABELAS

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS DE ANIMAIS

CONDIÇÕES GENÉTICAS

PARENTESCO

Veja as condições genéticas de todos os animais.

[Mostrar Mais](#)

Buscar por ID de Animal

RELATÓRIO DE DOWNLOAD

Filtro

Escolher predefinição

SALVAR COMO PREDEFINIÇÃO

LIMPAR FILTROS

Grupo

Tudo

Sexo

Tudo

Estado

Tudo

Período de Nascimento

Iniciar

ano-mês-dia

Finalizar

ano-mês-dia

Nº da Solicitação

Tudo

ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA-ÍNDICE



Mapa de calor

CONDIÇÕES GENÉTICAS

PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

ID do Animal	Nome do Animais	Grupo	Estado	HH1	HH2	HH3	H... ↓	HH5	HH6	BLAD	Condrosdylasia
Haplótipo 1 para raça Holandês — P Portador, NP Não Portador. Portador corresponde aos animais que possuem uma cópia do haplótipo que traz efeitos negativos na reprodução. Fêmeas portadoras quando acasaladas com touros não portadores podem não apresentar impacto negativo na reprodução. Acasalamentos entre fêmeas e machos portadores tem 25% de chance de ocorrência de morte embrionária.											
151		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
153		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
159		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
161		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
162		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
163		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
164		GC-4-5-6-4*,5*,6* GE...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
166		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
167		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
168		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
169		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR
170		PO - PURAS DE ORIG...	Ativo	F**	F**	F**	F**	F**	F**	F*	NR

## 5.4. Parentesco

Essa seção traz informações de pedigree disponíveis, incluindo resultados genomicamente verificados para todos os animais.

215

GERENCIAR REBANHO

RELATÓRIOS

ANALISE

SOLICITAÇÕES:

ABRIR

CONCLUÍDO

AMOSTRAS:

AÇÃO NECESSÁRIA

EM ANDAMENTO

REPORTADAS

2

6

0 (últimos 90 dias)

0

66 (últimos 90 dias)

RELATÓRIOS

TABELAS

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS DE ANIMAIS

CONDIÇÕES GENÉTICAS

PARENTESCO

Veja informações de pedigree disponíveis, incluindo resultados genomicamente verificados para todos os animais.

Mostrar Mais

Buscar por ID de Animal

RELATÓRIO DE DOWNLOAD

Filtro

Escolher predefinição

SALVAR COMO PREDEFINIÇÃO

LIMPAR FILTROS

Grupo

Tudo

Sexo

Tudo

Estado

Tudo

Período de Nascimento

Iniciar

ano-mês-dia

Finalizar

ano-mês-dia

ADICIONAR FILTRO DE CARACTERÍSTICA/ÍNDICE

PARENTESCO

PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

ID do Animal	Pedigree Sire	Genomic Sire	Evaluation Sire	Pedigree Sire Status ↑	NAAB Code (for Pedigr...	NAAB Code (for Report...
148	HOUSA000070098604	HOUSA000070098604	HOUSA000070098604	Confirmed	001HO10466	001HO10466
150	HOUSA000071753166	HOUSA000071753166	HOUSA000071753166	Confirmed	001HO11056	001HO11056
151	HOUSA000071753166	HOUSA000071753166	HOUSA000071753166	Confirmed	001HO11056	001HO11056
153	HOUSA000140206911	HOUSA000140206911	HOUSA000140206911	Confirmed	001HO10219	001HO10219
159	HOUSA000071753166	HOUSA000071753166	HOUSA000071753166	Confirmed	001HO11056	001HO11056
161	HO840003013001478	HO840003013001478	HO840003013001478	Confirmed	001HO12152	001HO12152
162	HOUSA000071753166	HOUSA000071753166	HOUSA000071753166	Confirmed	001HO11056	001HO11056
163	HOCAN000011857447	HOCAN000011857447	HOCAN000011857447	Confirmed	029HO17607	029HO17607
164	HOCAN000011857447	HOCAN000011857447	HOCAN000011857447	Confirmed	029HO17607	029HO17607
166	HOUSA000140206911	HOUSA000140206911	HOUSA000140206911	Confirmed	001HO10219	001HO10219
167	HO840003011816338	HO840003011816338	HO840003011816338	Confirmed	001HO11889	001HO11889

Como a confirmação de parentesco é realizada somente para raças contempladas pelo *Clarifide® Dairy* e *Plus*, pedidos de *Clarifide® Nelore*, *Angus* e *Girolando*, não contam com essa funcionalidade.


## 6. Análise

Essa seção auxilia na visualização de comparações do animal com os demais, fazendo uso, principalmente, de gráficos.



## 6.1. Referência

Essa seção permite que comparações do animal com todos os demais já testados, ou com grupos específicos, sejam feitas. Ao escolhermos o animal com o preenchimento do ID na caixa de busca, o gráfico abaixo é mostrado, o qual exibirá a posição do percentual do animal para cada característica/índice disponível.

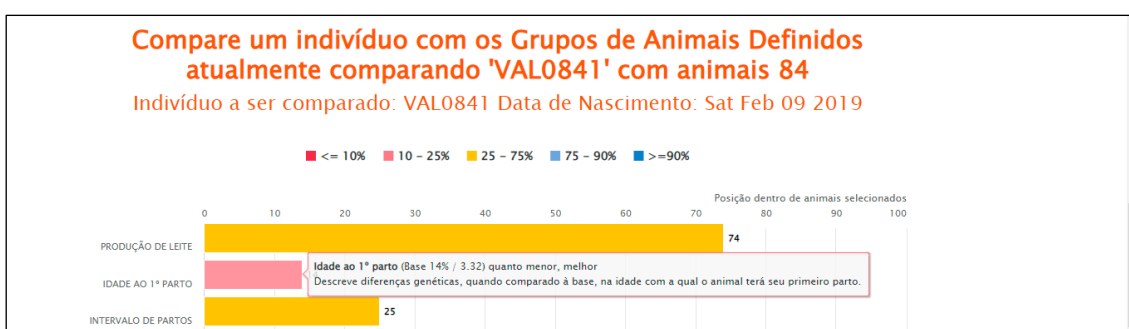


Ao passar o *mouse* sobre as barras, a porcentagem de classificação e valor de característica do animal selecionado, juntamente com uma breve descrição da característica/índice, são exibidos. É possível alterar o grupo com o qual o animal será comparado por meio da aplicação dos filtros disponíveis na tela. Ao clicar sobre a barra, um gráfico de distribuição das características é mostrado, sobre o qual falaremos mais na seção 6.3.

O mesmo modelo de gráfico apresentado nessa seção pode ser obtido ao acessarmos o menu “Relatórios Individuais de Animais”, cuja explicação encontra-se na seção 5.2. do Guia. Basta clicar em “Referência”, depois de estar com o relatório do animal exibido na tela.




## 6.2. Tendência genética


Essa seção conta com a projeção de gráficos que exibem o progresso genético ao longo dos anos. O gráfico é gerado levando-se em conta a média de GPTA/geração, por isso, é fundamental que a data de nascimento dos animais seja informada no momento do pedido. Como regra, são necessários pelo menos 30 animais testados/geração para que os gráficos de tendência genética sejam criados. O progresso genético médio para a característica ou índice selecionado, também é mostrado no gráfico. Por meio do menu suspenso “**Baixar Gráfico**”, é possível salvar e/ou enviar a imagem.

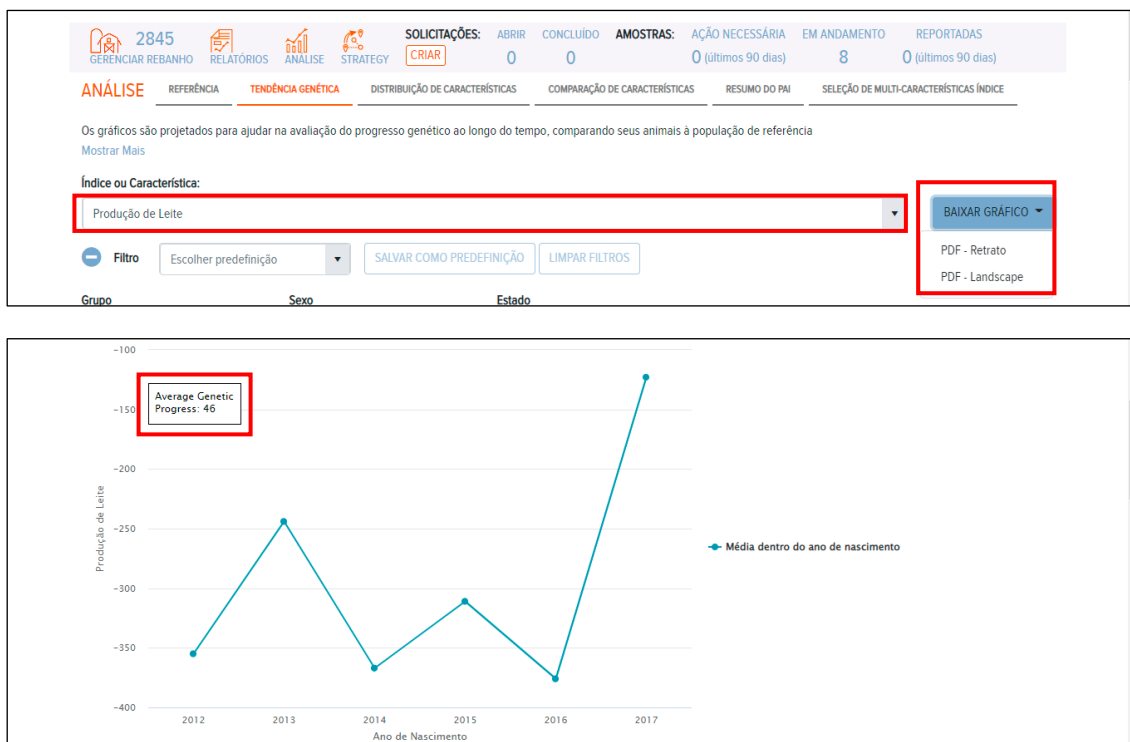

## 6.3. Distribuição de características


Essa seção mostra a distribuição dos animais por faixa de valores para a característica ou índice selecionado. Ao passar o *mouse* sobre as colunas, o número de animais em cada faixa é mostrado. A média com a qual os animais estão sendo comparados também é exibida na imagem gráfica. Da mesma forma que seção anterior, o gráfico pode ser salvo ou enviado em um arquivo separado.

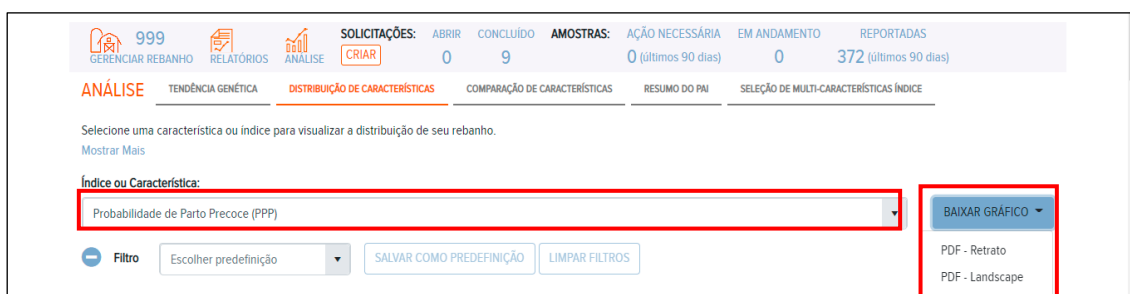

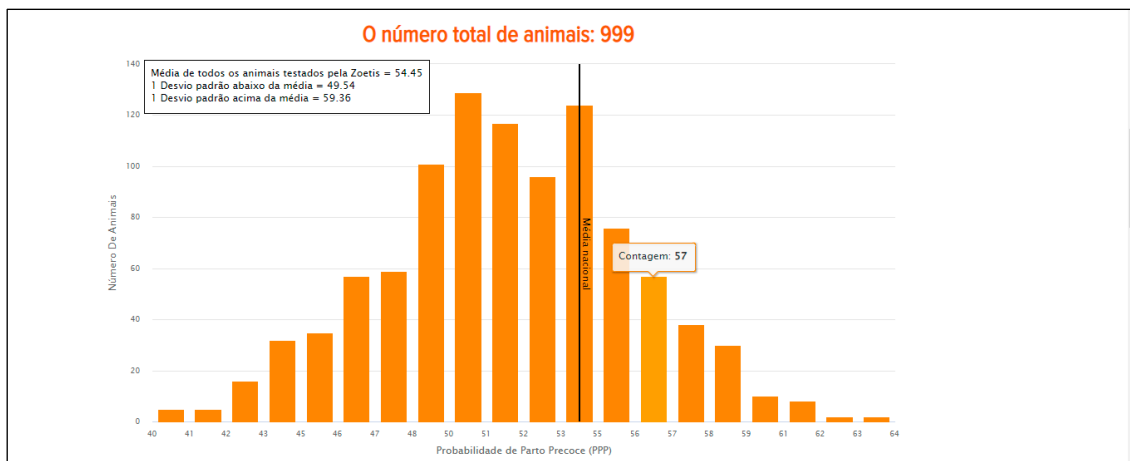


#### 6.4. Comparação de características


A comparação entre duas características fornece uma avaliação visual do grau de interação entre elas quando uma é aumentada ou diminuída. Essa análise é bastante útil para verificar o impacto em uma característica mediante a seleção com foco na outra. Os menus “Índice ou Característica” são usados para selecionar as duas variáveis. A correlação entre as características/índices é mostrada no gráfico, o qual também pode ser impresso, usando os mesmos padrões da plataforma.

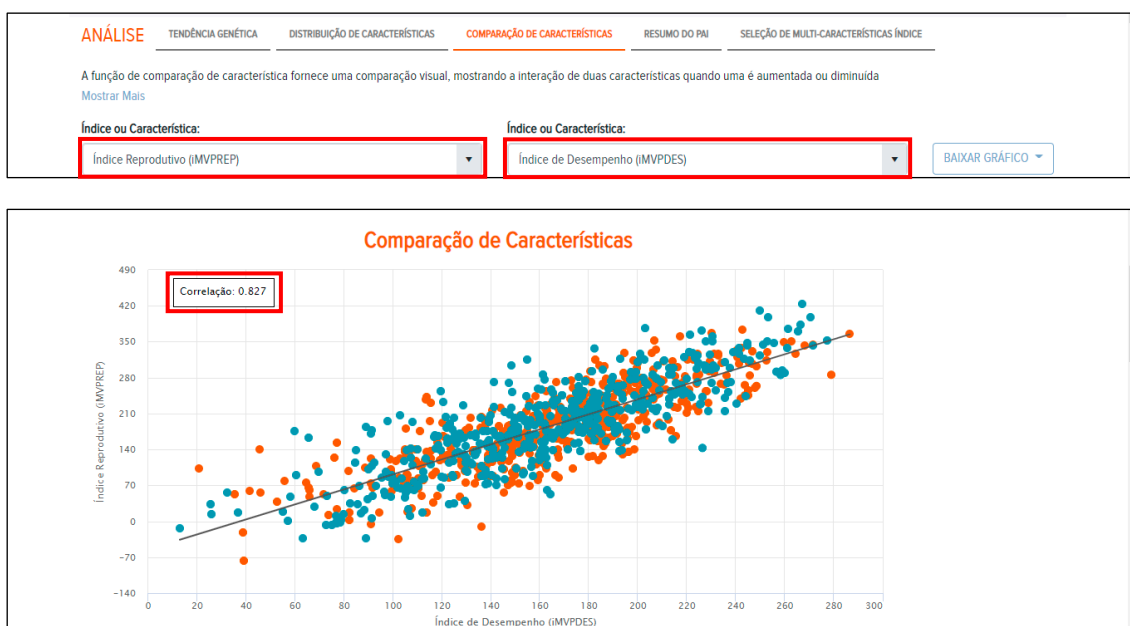

Ao passar o *mouse* sobre qualquer um dos pontos, é mostrada a qual animal se refere e os valores das características/índices.

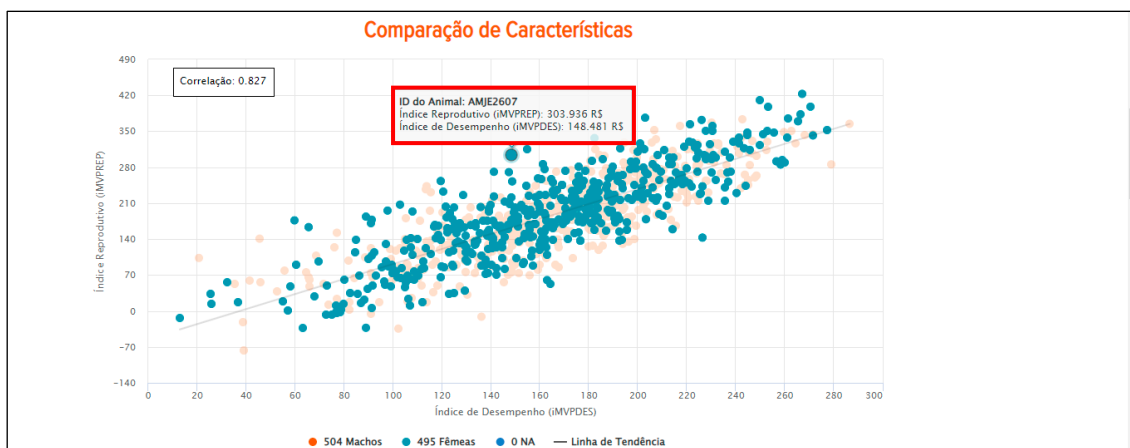

Por fim, a região da área do gráfico permite receber um *zoom* a fim de visualizar determinada região da distribuição de forma mais minuciosa. No exemplo, o *zoom* foi dado na extremidade superior direita do gráfico, local em que estão dispostos os melhores animais. Para retornar à visualização normal, basta clicar em “**Resetar**”.

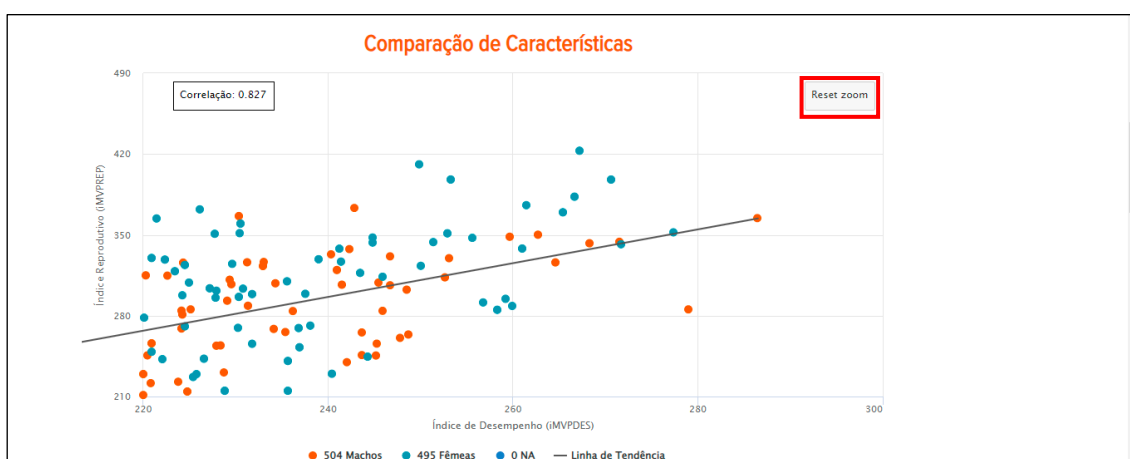


## 6.5. Resumo do pai


Essa opção mostra de maneira gráfica os touros com mais filhos testados dentro dos filtros estabelecidos.



A identificação dos touros é mostrada na legenda dos gráficos e caso queira mais detalhes mais detalhes sobre os filhos de um touro específico, basta clicar na fatia correspondente e a tabela abaixo trará as informações daquele grupo.

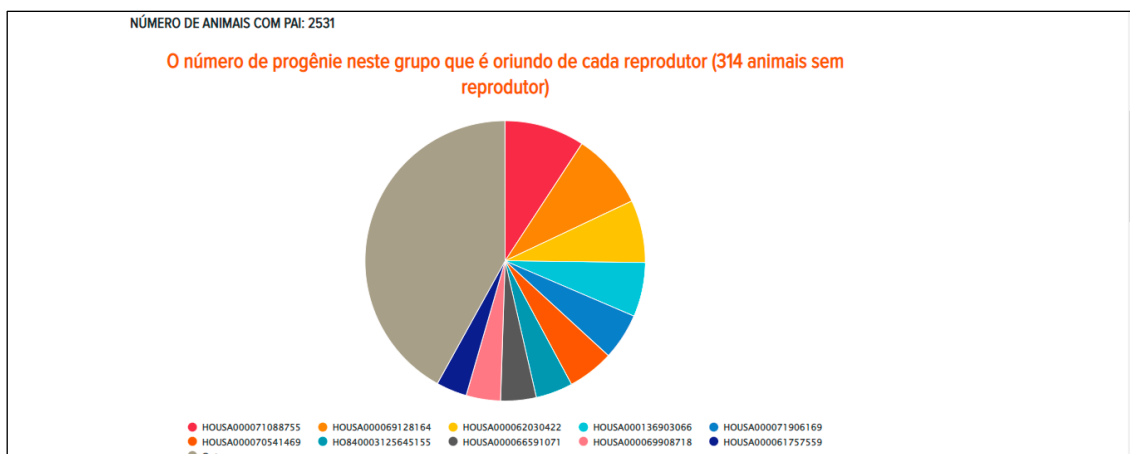

No exemplo abaixo, informações de 234 animais filhos de um mesmo touro são mostradas na tabela, a qual também pode ser customizada (item 5.1.6).

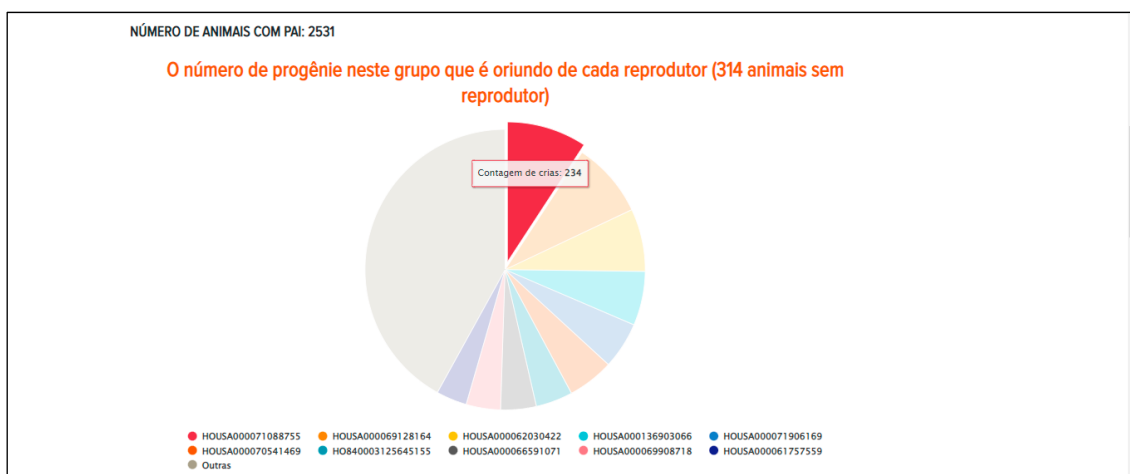

**RESUMO DO PAI** DIGITE O NOME DO RELATÓRIO AQUI PERSONALIZAR COLUNAS EXIBIDAS

ID do Animal	Nome do Animais	Grupo	Sexo	Data de N...	Sire NAAB Code	Evaluation Sire	NAAB Code (for Report...	Ação
17568		Active Breeding List 2...	Fêmea	2017-11-03	029HO17516	HOUSA000071088755	029HO17516	Visualiz...
17569		Active Breeding List 2...	Fêmea	2017-11-03	029HO17516	HOUSA000071088755	029HO17516	Visualiz...
17544		Active Breeding List ...	Fêmea	2017-10-27	029HO17516	HOUSA000071088755	029HO17516	Visualiz...
17501		Active Breeding List ...	Fêmea	2017-10-10	029HO17516	HOUSA000071088755	029HO17516	Visualiz...
17360		Lista de Reprodução ...	Fêmea	2017-09-03	029HO17516	HOUSA000071088755	029HO17516	Visualiz...
17337		Lista de Reprodução ...	Fêmea	2017-08-28	029HO17516	HOUSA000071088755	029HO17516	Visualiz...
17333		Lista de Reprodução ...	Fêmea	2017-08-27	029HO17516	HOUSA000071088755	029HO17516	Visualiz...
17336		Lista de Reprodução ...	Fêmea	2017-08-27	029HO17516	HOUSA000071088755	029HO17516	Visualiz...

1 - 100 of 234 items

Como a confirmação de parentesco só está disponível para pedidos de *Clarifide® Dairy e Plus*, essa funcionalidade não funcionará para solicitações de Nelore, Angus e Girolando.

## 6.6. Seleção de multi-características/índice

Essa seção possibilita a criação de um índice de seleção de multi-característica que permite a seleção de apenas as características que são importantes para você e decida a quantidade de ênfase que deve ser dada a essas características para sua operação. Para criar um novo índice, basta clicar em **“Criar Novo índice Multi-Característica”**, nomeá-lo, escolher em quais relatórios

você deseja que ele seja mostrado, dar a ênfase desejada nas características/índices de interesse e salvá-lo.

999

GERENCIAR REBANHO

RELATÓRIOS

ANÁLISE

criar

SOLICITAÇÕES:

ABRIR

CONCLUÍDO

AMOSTRAS:

AÇÃO NECESSÁRIA

EM ANDAMENTO

REPORTADAS

0

9

0 (últimos 90 dias)

0

372 (últimos 90 dias)

ANÁLISE

TENDÊNCIA GENÉTICA

DISTRIBUIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

COMPARAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

RESUMO DO PNI

SELEÇÃO DE MULTI-CARACTERÍSTICAS ÍNDICE

Criar um índice de seleção de multi-característica permite que você selecione apenas as características que são importantes para você e decida a quantidade de ênfase que deve ser dada a essas características para sua operação específica

Mostrar Mais

\*TESTE

criar novo índice multi-característica

Nome: /100 símbolos

Teste

Descrição: /500 símbolos

Exibir esse Índice de Multi-característica nos próximos relatórios:

☒ Referência

☒ Breed Strategy Assignment

☒ Tabelas

☒ Distribuição de Características

☒ Comparação de Características

Característica	Ponderação	Peso Normalizado, %	Correlação com meu Índice de Seleção Multi-Characterística	Característica	Ponderação	Peso Normalizado, %	Correlação com meu Índice de Seleção Multi-Characterística
PPP_MVP	30	30		CE450_MVP	0		
IPP_MVP	0			AOL_MVP	10	10	
STAY_MVP	30	30		GORD_MVP	10	10	
PAC_MVP	0			ED_MVP	0		
PG_MVP	0			ES_MVP	0		
PI20_MVP	0			PD_MVP	0		
P210_MVP	0			PS_MVP	0		
P365_MVP	20	20		MD_MVP	0		
P450_MVP	0			MS_MVP	0		
HMI20_MVP	0			ALT_MVP	0		
HM210_MVP	0			IMVPREP_MVP	0		
CE365_MVP	0			IMVPDES_MVP	0		
				Total:	100		

salvar

redefinir

excluir